



CORPORATIVOMI



Autoclave Profesional (432L)
Marca ARA Modelo 6060120

Los Autoclaves de Corporativomi cumplen con los lineamientos de Buenas Prácticas de Fabricación y cuentan con Registro Sanitario emitido por Cofepris.

El **Modelo 6060120** se fabrica con una cámara cuadrada con capacidad de **432 litros**, lo que indica una inmensa capacidad de carga, ideal para esterilizar numerosos bultos simultáneamente.

Avenida Industriales No. 2 Col. Parque del bajo C.P. 36270 Silao, Gto.

Tel. [\(472\) 722 97 78](tel:(472)7229778)

Fax [\(472\) 722 97 55](tel:(472)7229755)

e-mail: corporativomi3@gmail.com

corporativomi.com

Los **AUTOCLAVES ARA** son equipos profesionales de esterilización, los cuales incluyen generador de vapor, puerta de seguridad de acero con brazos radiales y doble cámara fabricada en acero inoxidable.

Estos son uno de los mejores equipos de esterilización que hay en el mercado nacional y tienen como finalidad esterilizar grandes cantidades de material.

Permiten la esterilización de microorganismos y esporas en diversos productos y materiales resistentes a altas temperaturas y a la humedad.

Capaz de esterilizar:

- Textiles
- Instrumental
- Líquidos
- Frascos
- Hule
- látex
- Cristalería
- Artículos de laboratorio
- Otros materiales resistentes al calor, humedad y presión de vapor

**Puerta de seguridad
con cierre hermético**



Cuenta con:

- **Cámara interna cuadrada** de 60 cm de lado por 120 cm de fondo
- **Cámara de esterilización** (interna) y **camisa** (externa) fabricadas en *acero inoxidable tipo 316 L*
- Camisa recubierta con **aislamiento de lana mineral** cubierta de lamina de aluminio. Efectiva para reducir el calor ambiental.
- **Puerta radial de seguridad** fabricada en placa de *acero inoxidable tipo 304* con cierre hermético de apertura manual
- **Seguro Automático de puerta**
- Generador propio de vapor fabricado en acero inoxidable tipo 304
- Indicador de nivel de agua
- Gabinete de Acero Inoxidable
- Depósito para alimentación del generador de vapor con entrada de agua.
- Salida de agua manual a desagüe
- Manómetro indicador de presión para cámara de esterilización
- Manómetro indicador de presión para generador de vapor
- Foco piloto indicador de funcionamiento.
- Trampa termostática de vapor.
- Control de presión
- Vacío por medio de Venturi
- Válvula de cambios




6060120

Estos equipos pueden ser de funcionamiento **Manual** o **Semiautomático** o **Automático**.

	MANUAL	SEMIAUTOMÁTICO	AUTOMÁTICO
Llenado de agua con llave de paso	Si	Si	No
Llenado de agua con electro válvulas desde la pantalla	No	No	Si
Sistema de protección contra falta de agua	Opcional	Opcional	Incluido (Se recomienda uso de ablandador de agua)
Indicador visual de falta de agua	Opcional	Opcional	Incluido
Indicador de fin de ciclo	No	No	Si
Timer para control de tiempo de esterilización	No	Incluido	Incluido en Pantalla Táctil
Programas de esterilización preestablecidos de forma automática	No	No	8
Despresurización automática al finalizar ciclo de esterilización	No	Si	Si
Electroválvulas	No	Si	Si
Válvula de cambios	Manual	Semiautomática	Automática
Pantalla Táctil	No	No	Si
Capacidad de programación y control de los parámetros de esterilización	No	No	Si
Capacidad para instalar <u>Impresora Alfanumérica</u> (No incluida)	No	No	Si

Tiempos recomendados para la esterilización:

- Ropa e instrumental
30 – 40 minutos
- Cristalería y agua
20 – 30 minutos
- Guantes, hules y látex
15 – 20 minutos

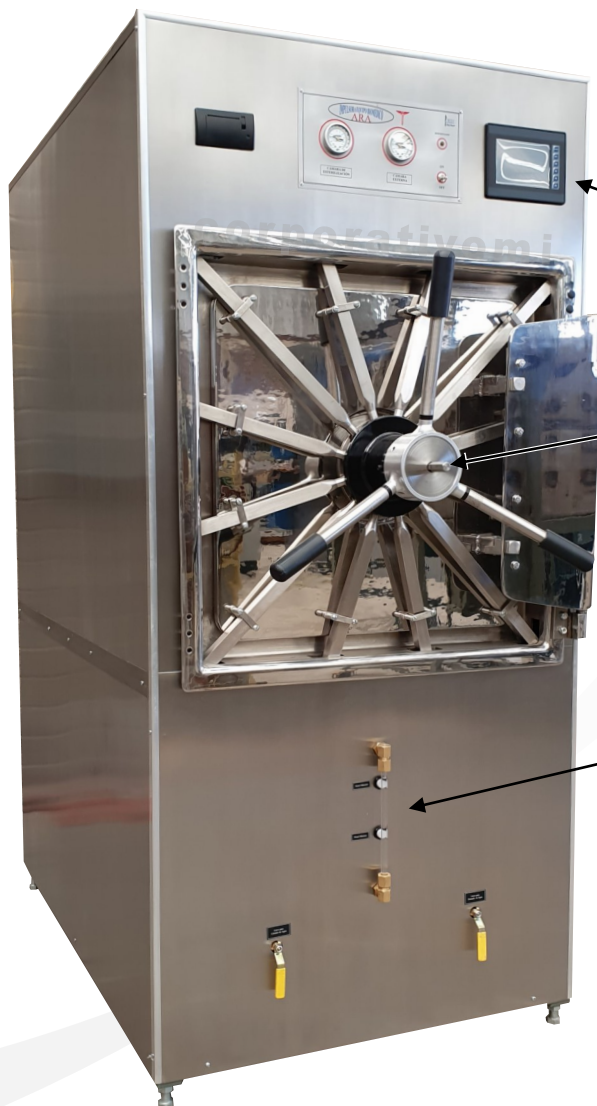

Pantalla Táctil
(Sólo en modelo automático)

Seguro Automático de puerta
Impide su apertura durante
el ciclo de esterilización

Nivel de agua visible

6060120

Accesorios opcionales:

- Sistema de seguridad que apaga el equipo en caso de existir falta de agua
- Sistema ablandador de agua con hidroneumático
- Impresora alfanumérica de rollo de papel de todos los parámetros del ciclo de esterilización así como temperatura, tiempo, presión, fecha, hora y/o fallas en el manejo o funcionamiento
- Indicador visual de falta de agua (Incluido en modelo Automático)

Indicador visual de falta de agua



Impresora Alfanumérica



Semiautomático

El modelo semiautomático cuenta con temporizador para la activación y desactivación de las electro-válvulas.



Automático

El modelo automático cuenta con un panel de control digital con luz de fondo y sección con teclas de membrana para llevar a cabo todos los procesos de manera automática.

La **Pantalla Táctil** muestra los siguientes parámetros:

- Despliegue digital de temperatura, presión y tiempo durante todo el proceso de esterilización
- Programas de pre-vacío
- Programas de post-vacío
- Indicador de programas y gráficas de ciclos
- Gráfica de los ciclos de esterilización (la cual tiene un tiempo de 180 minutos)

Además cuenta con capacidad de programación y control de los parámetros de la esterilización



6060120